

## Vorbereitung der Aufhängung

Richten Sie die Pferdeschaukel möglichst raummittig unterhalb der Deckenschienen aus. Die runde Seite zeigt dabei immer nach oben, um die Tragfähigkeit der Aufhängelaschen zu gewährleisten. Die Schaukel wird über vier Aufhänge-Seile aufgehängt, welche zu 4-, 2- oder zu einem Einzelpunkt an der Deckenschiene zusammengeführt werden.



Die abgerundete Seite zeigt immer nach oben.

Stellen Sie die Seile auf die gewünschte Höhe ein und befestigen Sie diese mit Hilfe des Karabiners an der Deckenhalterung oder den Deckenschlitten.

### Empfehlenswerter Zusatz:

3D Schaukeln: Die Elastikbänder sorgen für ein noch nie da gewesenes Schaukelerlebnis! Faustregel: Ein Elastikband je 12, 5 kg Körpergewicht!



### Fallschutz:

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende Turnmatten und einen ausreichenden Fallschutz um und unter der Pferdeschaukel.

Pferdeschaukel befestigt an 4 Aufhängepunkten:



Pferdeschaukel befestigt an 2 Aufhängepunkten:



Pferdeschaukel ergänzt mit Elastibändern:



**Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.**

Sicherheitstipp:

Die Pferdeschaukel ist für eine maximale Belastung von 150 Kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.




**Achtung**

Es ist sicherzustellen, dass sich während der Benutzung der Pferdeschaukel keine Person darunter aufhält! Auch im belasteten Zustand sollte immer ein **Abstand von 45-50cm zum Boden** gewährleistet sein.

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.

## Spezifikation

Halbzylinder, Durchmesser 30cm Länge: 1,25m

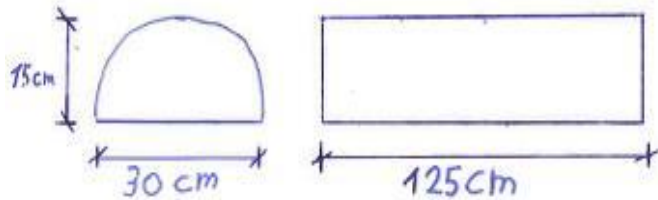

Produktmaterial: Hochfestes Cordura  
Hempex-Tauwerk 16 mm

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn, die extrem starken Abrieb vertragen. Es ist ein spezielles Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

### Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

### Lieferumfang:

1 Pferdeschaukel aus Cordura, Farbe: grün

inklusive

4 x 2m Aufhängeseile mit Stellacht und Öse

4 Stück Sicherheitskarabiner

4 Stück Schutzschläuche

## Wartung

Nach DGUV ist bei Litzenbruch, Beschädigung, Auflockerung (Seil und Spleiß) bzw. beim Herausfallen von Fasermehl beim Aufdrehen des Seils die Ablegereife für Faserseile erreicht.

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361

Fax: 0 451 / 5040371

e-Mail: info@ullewaeh.de

**Ullewaeh GmbH**  
Am Flugplatz 4 / Haus 6  
23562 Lübeck  
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

**ULLEWAEH!**  
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

## **Pferdeschaukel**

Datum: 01/2018

Art-Nr: 040-2110



### Beschreibung

Die ULLEWAEH-Pferdeschaukel verbindet funktionale Vielfalt mit Qualität und Sicherheit. Sie ist optimal geeignet für die effektive Therapigestaltung in der Ergotherapie. In Spiel- und Bewegungsbereichen von Kindertagesstätten lädt sie zum Schaukeln und Verweilen ein.